


STAVEM

À LA CONQUÊTE DE VOS PROJETS

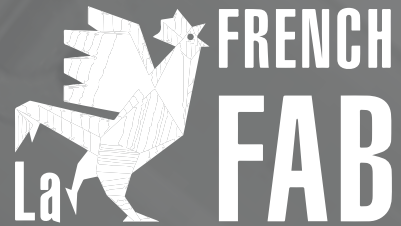

VISIÈRE DE PROTECTION RÉFÉRENCE : PROTEC

DÉTAIL

- Serre-tête réalisé en injection plastique (moule réalisé par la société RMO)
- Visière perforée en PET recyclé transparent
- Elastique (non-fourni)



UTILISATION

Destiné aux personnels :

- Non soignants
- Soignants, en dehors de leurs activités nécessitant un rapprochement étroit avec les patients.

Ce matériel **ne saurait remplacer un masque chirurgical ou masque FFP2** dans un environnement chargé en virus.

Son usage engage la seule responsabilité de son utilisateur. A ce jour et compte tenu de l'absence d'homologation par la Direction générale de l'Armement (DGA), l'agence régionale de santé des Pays de la Loire ne saurait, de par l'absence de compétences en la matière, être tenue pour responsable de quelque mauvaise utilisation que ce soit en dehors du cadre strict précédemment défini. La responsabilité du fabricant, en dehors de défauts de fabrication, ne peut être engagée.

MISE EN PLACE


Assemblez la visière transparente au serre-tête et **placez-la au-dessus des sourcils**.

Selon votre préférence, vous pouvez **associer un élastique** à l'arrière du serre-tête de la visière pour optimiser son serrage.

Cette visière peut être combinée au **port d'un masque barrière**, d'une **charlotte** ou autre. Il permet le port de lunettes correctrices.



mould shop

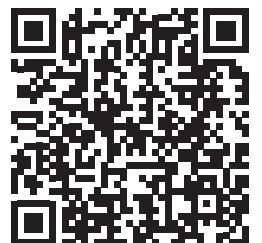

Parc industriel la prairie - 01100 Groissiat
Tel: 04 74 73 00 33 - Fax: 04 74 73 61 11
E-mail: info@stavem.com
www.stavem.com - www.mouldshop.fr